


GoldTemp toplomer  
Microlife MT 1931

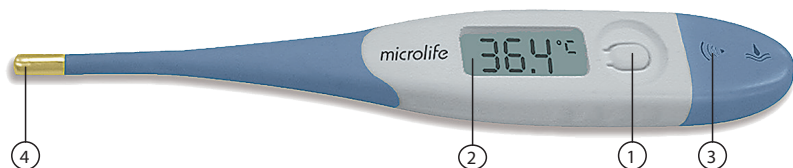

Opis toplomera

- ① Dugme ON/OFF (uključi/isključi)
- ② Ekran
- ③ Poklopac za odeljak sa baterijama
- ④ Senzor za merenje

Uputstva

- Toplomeri su namenjeni isključivo za merenje telesne temperature.
- Bez izuzetaka se mora ispoštovati minimum vremena za merenje do signalnog zvuka (bip).
- Toplomer sadrži male delove (baterije, i sl.) koje deca mogu progutati. Zato nikada ne ostavljajte toplomer kod dece bez da ih nadgledate.
- Zaštite toplomer od padova i udaraca!
- Izbegavati savijanje vrha više od 45oC.
- Izbegavati da temperatura okoline bude viša od 60oC. NIKADA ne iskuvavajte toplomer!
- Za čišćenje toplomera koristite isključivo uobičajene dezinficijense navedene u odeljku »čišćenje i dezinfekcija«. Kod upotrebe tečnog dezinficijensa pre uranjanja u isti proverite da li ima nekih oštećenja na toplomeru .
- Proizvođač preporučuje da svake druge godine izvršite proveru ispravnosti kod ovlašćene laboratorije.
- **UPOZORENJE:** Toplomer sadrži dugotrajne baterije. Za uklanjanje, molimo da postupite u skladu sa lokalnim pravilima o specijalnom otpadu.

Uključivanje toplomera

Za uključivanje toplomera pritisnite dugme iznad displeja. Kratak signalni zvuk (bip) signalizira »toplomer je uključen«. Obavlja se je testiranje displeja. Tada, pri temperaturi okoline manjoj od 32°C, u gornjem desnom uglu displeja pojavljuju se »L« i »C«. Toplomer je sada spreman za upotrebu.

Korišćenje toplomera

Tokom merenja, trenutna temperatura je stalno prikazana na displeju. Tokom ovog perioda trepereće znak »C«. Kada se signalni ton oglasi (bip-bip-bip, 10 puta) i »C« više ne treperi, to znači da se izmerena temperatura sada povećava za manje od 0,1oC na svakih 16 sekundi i da je toplomer spreman za očitavanje. Kako biste produžili vek trajanja baterija, isključite toplomer odmah nakon korišćenja kratkim pritiskanjem operativnog dugmeta ON/OFF. U suprotnom, toplomer će se automatski isključiti nakon otprilike 10 minuta.

Čuvanje izmerenih vrednosti

Ukoliko, prilikom uključivanja toplomera, držite dugme pritisnuto duže od 3 sekunde, na displeju će se prikazati maksimalna temperatura koja je automatski sačuvana prilikom poslednjeg merenja. Istovremeno, malo »M« za memoriju će se pojaviti u desnom uglu displeja. Nakon još 3 sekunde vrednost će nestati i toplomer će se vratiti na normalan režim za merenje. Tada je sačuvana vrednost obrisana.

Tehničke karakteristike

Raspon merenja	32,0°C do 43,9°C Temp.< 32,0°C, na displeju stoji »L« za niska (suviše niska) Temp.> 43,9°C,na displeju stoji »H« za visoka (suviše visoka)
Tačnost merenja	0,1°C između 34°C i 42°C pri temperaturi okoline od 10°C do 40°C pri relativnoj vlažnosti od 15-95%
Samo-test	Automatska interna provera kod vrednosti od 37°C; ukoliko postoji devijacija > od 0,1°C, »ERR« (greška) se pojavi na displeju
Displej	Tečni kristalni displej (LCD) sa tri brojke Najniža jedinica koja se prikazuje je 0,1 °C
Signalni zvuk	Za davanje signala da je toplomer spreman za korišćenje i da je povećanje temperature manje od 0,1°C na 16 sekundi
Memorija	Za čuvanje poslednjih izmerenih vrednosti
Temperatura čuvanja	-25 °C do + 60 °C pri relativnoj vlažnosti od 15-95%
Baterije	1,5 / 1,55V; LR41
U skladu sa standardima	EN 12470-3; klinički toplomer ASTM E1112 standard ; IEC60601-1; IEC60601-1-2(EMC)

Uređaj odgovara zahtevima Evropske Direktive 93/42 za medicinska sredstva. Sačuvano pravo tehničkih izmena!

Garancija

Dajemo Vam doživotnu garanciju nakon datuma kupovine. Svaka šteta uzrokovana nepravilnim rukovanjem, neće biti pokrivena garancijom. Baterije i pakovanje takođe nisu obuhvaćene garancijom. Svaka druga šteta ne podleže garanciji. Reklamacija garancije mora biti podneta zajedno sa računom. Molimo Vaš neispravan toplomer prijavite ovlašćenom distributeru:

Datum kupovine:



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.

Proizvođač: Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Švajcarska

Nosilac Rešenja za upis u Registar medicinskih sredstava, uvoznik i distributer: R&B Medical Company doo, Zvečanska 38, Beograd, R.Srbija  
Tel/fax: +381 11 408 3207, e-mail: office@rbmedical.co.rs, www.rbmedical.rs

Broj rešenja o upisu: 515-02-00310-19-002

Datum izdavanja Rešenja: 21.03.2019.